

# 通告 NOTICE

檔案編號： SHKI/2022/N261  
Ref.

張貼日期： 2022年3月22日  
Post from 張貼至活動完結

山景邨各住戶：

## 快速檢測包使用指引

1.) 每套檢測包包括：兩支密封包裝棉棒；兩支藥水；兩支檢棒測棒。



2.) 棉棒插入鼻孔，兩邊鼻孔各轉五次。  
(要伸入至有不適感)



3.) 將棉棒放入藥水瓶，轉約 20 個圈。



4.) 滴三至四滴藥水至檢測棒圓型位置。



5.) 靜置 15 分鐘，如檢測棒出現一條線，  
即為陰性。



6.) 如檢測棒出現兩條線，即為陽性，請立  
即前往衛生署網頁發記確診。



山景邨物業服務辦事處